

Handleiding ALOHA opstart



Kant-en-klaar symboolvocabulaire voor kinderen en jongeren
die niet of nauwelijks kunnen spreken

ALOHA OC:

Mandy Diepeveen

Ans Kilkens

Loes Theunissen

Hanny Weersink



In samenwerking met:



Zie ook de originele handleiding van het symboolvocabulaire ALOHA 1.3 en 2.3 (versie 02-03-2022)

©2023, ALOHA OC, Nijmegen

Is het communiceren met ALOHA iets voor jouw kind maar is onduidelijk hoeveel pictogrammen op één blad kunnen staan?

Wil je bekijken uit hoeveel pictogrammen jouw kind een selectie maakt/kan leren maken?

Wil je het aantal pictogrammen in stapjes kunnen uitbreiden?

Probeer dan geheel vrijblijvend ALOHA opstart uit met behulp van de 30 dagen demo van Mind Express 5. Heb je al toegang tot Mind Express 5 dan is ALOHA opstart onbeperkt te gebruiken.

Wat is ALOHA opstart?

ALOHA opstart is een aangepaste versie van het kant-en-klaar symboolvocabulaire ALOHA¹. Met ALOHA opstart kan worden bekeken uit hoeveel pictogrammen het kind² een pictogram kan (leren) selecteren op een blad, onder andere via touch (aanraken van het pictogram) of oogbesturing. Vooral bij kinderen met motorische, cognitieve en/of visuele beperkingen kan dit ondersteunend zijn om te bepalen of het raster van ALOHA 1 (6x6 vakken) dan wel ALOHA 2 (8x7 vakken) passend zou kunnen zijn.

Er zijn twee versies van ALOHA opstart. Versie één bevat de onderwerpen 'eten' en 'spelen' en versie twee de onderwerpen 'zingen' en 'spelen'. Afhankelijk van de voorkeuren van het kind gebruik je één van deze twee versies. Beide versies bevatten een startblad met een verwijzing naar vijf vervolgbladen. Er is een opbouw gemaakt van twee keuzes per blad tot maximaal 26 keuzes per blad. In Figuur 1 wordt deze opbouw weergegeven.

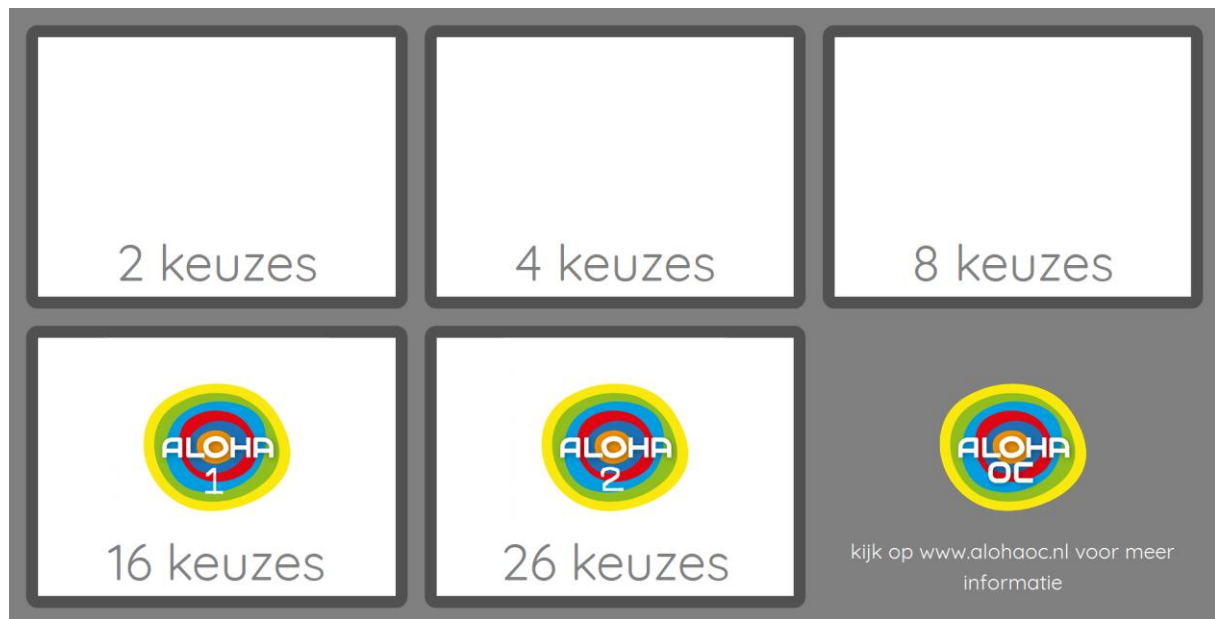


Fig. 1 Startblad ALOHA opstart

¹ Voor meer uitleg over het kant-en-klaar symboolvocabulaire ALOHA verwijzen we naar www.ALOHAOC.nl

² Kind/(jong)volwassene

Figuur 2 geeft het vervolgblad van eten weer (4 keuzes) waarbij het kind uit vier favorieten zijn selectie maakt.

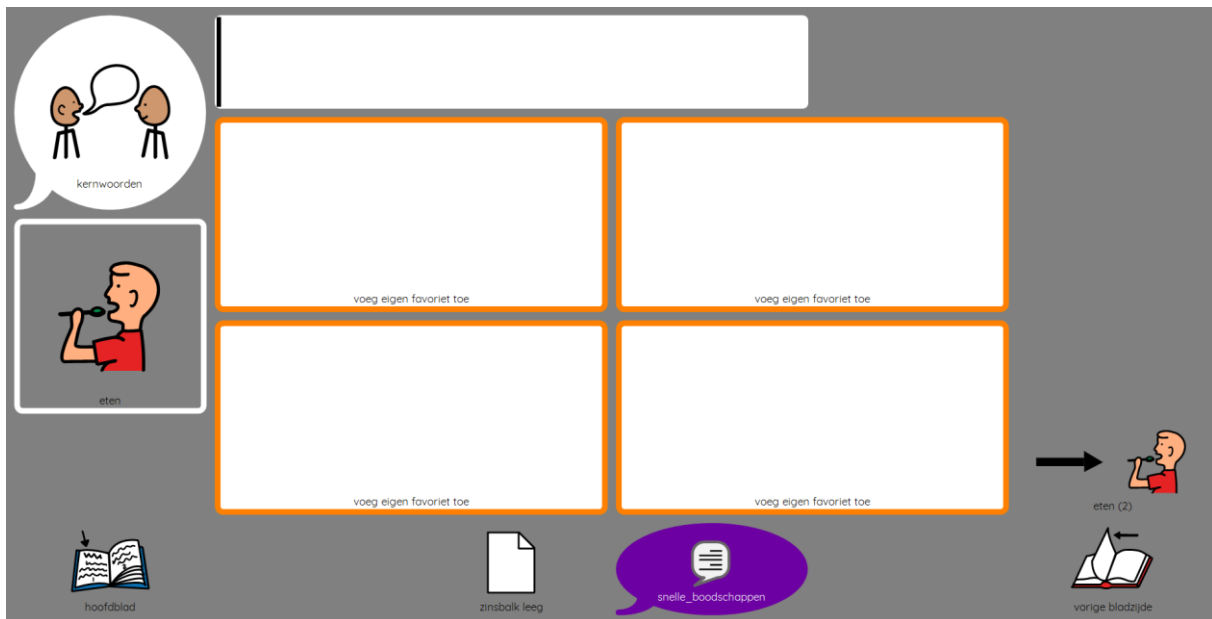


Fig. 2 Vervolgblad eten 4 keuzes

De grootte van de pictogrammen (raster) op het vervolgblad '16 keuzes' komt overeen met het raster van ALOHA 1. Het vervolgblad '26 keuzes' komt overeen met het raster van ALOHA 2.

Aangezien ieder kind zijn eigen favorieten heeft, moeten deze zelf worden toegevoegd op de betreffende bladen. Op alle bladen zijn de witte spraakballon 'kernwoorden' en een selectie uit de paarse spraakballon 'snelle boodschappen' opgenomen. Dit zijn woorden die gemakkelijk in verschillende situaties kunnen worden gebruikt en zijn in eerste instantie voornamelijk bedoeld voor de gesprekspartner, zie hieronder 'modelleren'.

Hoe gebruik ik ALOHA opstart?

Bij het gebruik van ALOHA opstart gaan we uit van twee belangrijke strategieën: modelleren en ontlokken.

Modelleren

Modelleren wil zeggen dat je zelf het communicatiehulpmiddel gebruikt terwijl je met het kind praat. Het kind krijgt zo de kans om niet alleen de betekenis van de pictogrammen te leren maar ook te begrijpen hoe je ermee kunt communiceren.

Ontlokken

Bij ALOHA opstart gaan we vanuit de voorkeuren van het kind te werk. Ontlokken wil zeggen dat er momenten worden gecreëerd waarin het gebruik van een specifiek pictogram wordt uitgelokt. Bijvoorbeeld het onderbreken van een geliefde activiteit of het buiten bereik plaatsen van een geliefd voorwerp waardoor het kind wordt aangemoedigd om aan te geven wat het wil. Of het creëren van een (grappige) situatie waardoor het kind wordt aangemoedigd commentaar te leveren.

ALOHA opstart wordt bij voorkeur gebruikt in samenwerking met een professional met kennis en ervaring van ondersteunde communicatie in de vorm van een spraakcomputer, zoals een logopedist of ergotherapeut. Deze professional kan ondersteuning bieden bij zowel het technische aspect van ALOHA opstart, zoals het toevoegen van de favorieten, als de toepassing van bovenstaande strategieën.

Tutorials

Zie de onderstaande tutorials voor een uitleg over ALOHA opstart, hulp bij het importeren van ALOHA opstart en het toevoegen van favorieten:

- [ALOHA opstart](#)
- [downloaden ALOHA in ME5 en naam toevoegen](#)
- [favoriet toevoegen in ME5](#)
- [geïmporteerde foto toevoegen in ME5](#) (optioneel in geval er gebruik wordt gemaakt van een foto in plaats van een pictogram)